



MYOPRO[®]



EAST OPTICAL

Guide d'ajustement et de port de lunettes MyoPro[®]



MyoPro.ca

Sélection de la Monture

Lignes directrices clés à présenter:

- La hauteur de la monture doit être d'au moins 28 mm et au maximum 48 mm.
- La différence entre la largeur totale de la monture (pont inclus) et la distance pupillaire totale du porteur ne doit pas dépasser 8 mm.
- Optez pour des montures légères et ajustables.

PUISSANCE EN SPHÈRE

PUISSANCE EN CYLINDRE NÉGATIF

	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
+1.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
+0.75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
+0.50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
+0.25	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
0.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-0.25	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-0.50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-0.75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-1.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-1.25	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-1.50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-1.75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-2.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-2.25	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-2.50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-2.75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-3.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-3.25	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-3.50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-3.75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-4.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-4.25	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-4.50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-4.75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-5.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-5.25	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-5.50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-5.75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-6.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-6.25	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-6.50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-6.75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-7.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-7.25	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-7.50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-7.75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-8.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-8.25	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-8.50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-8.75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-9.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-9.25	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-9.50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-9.75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-10.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-10.25	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-10.50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-10.75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-11.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-11.25	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-11.50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-11.75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
-12.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

Instructions Générales:

1. Localisez l'ordonnance du patient (sphère et cylindre).
2. Vérifiez que le verre brut s'adapte à la monture sélectionnée.
3. Si ce n'est pas le cas, choisissez une monture plus petite.





Pour toute question ou assistance supplémentaire,
contactez-nous à myoprocanada@gmail.com

MYOPRO[®]


EAST OPTICAL

MyoPro[®] est une marque déposée de East Optical, Inc. © 2025